



## INFORMATIONEN BLATT

# QUANTIFERON TEST

### Allgemeines

- Die Einsendung ins ENML muss montags oder dienstags erfolgen, sofern auf die angegebenen Tage kein Feiertag folgt. Die Durchführung an allen anderen Tagen ist NICHT möglich.
- Die Analyse erfolgt über unser Partnerlabor:

Prof. Wewalka  
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH  
Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
Währingerstraße 25a  
1096 Wien  
Tel.: +43 50 555-37111  
Fax: +43 50 555-37109

- Die Diagnosevoraussetzung für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen ist: Verdacht auf TBC, Einstellung auf Biologica, Biologica Therapie. Eine dieser Diagnosen muss auf dem Überweisungsschein vermerkt sein.
- Das Kürzel, unter dem der Test in Labrequest zu finden ist, lautet: QF-TB.

### Probengewinnung: Material & Medium

- Spezielle Quantiferon Abnahmeröhrchen verwenden. Set bestehend aus je 1 Röhrchen mit grünem, grauem, lila und gelbem Verschluss. Artikelnr.: 0103001, Materialnummer: HEP16, HEP17, HEP18, HEP 19

ACHTUNG pro Patient müssen alle 4 Röhrchen verwendet werden. Blut erst möglichst kurz vor Probenabholung abnehmen!



- Röhrcchen unmittelbar nach dem Befüllen zehn Mal gut kippen, sodass die Innenwand der Röhrcchen ganz mit Blut bedeckt ist, und sich dadurch die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen können. Bitte Zeitpunkt der Blutabnahme auf dem Einsendeschein vermerken. Die abgenommenen Proben müssen bei Raumtemperatur gelagert werden und innerhalb von 16 Stunden im Labor eingelangt sein.
- Bitte geben Sie die abgenommenen Röhrcchen in die dafür vorgesehene Probentransportbox für Quantiferon Tests.  
**Die Probentransportbox für Quantiferon bitte ausschließlich für Quantiferon Röhrcchen verwenden!** Bitte geben Sie kein anderes Abnahmematerial in diese Boxen, da diese Boxen nicht gekühlt werden. Vielen Dank.  
Nur durch Einhaltung der Abnahme- und Transportbestimmungen kann ein korrektes Analyseergebnis gewährleistet werden.
- Pro Patient bitte einen Probenbegleitschein mitgeben (wird vom Labor zur Verfügung gestellt bzw. Ausdruck aus Labrequest mit Überweisung).
- **Bitte beachten Sie, dass wir die Spezialblutröhrcchen nicht lagernd haben. Die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche ab Bestellung.**  
  
**Die Probentransportbox Artnr. 0103006 ist bei Meditec nach jedem Transport ins Labor nachzubestellen!**  
  
Wir ersuchen Sie, dies bei der Bestellung Ihrer Patienten zu berücksichtigen.
- Wir ersuchen Sie, bevor Sie mit dem Einsenden von Quantiferon ins Labor beginnen, kontaktieren Sie bitte unsere Befundhotline unter 0810 08 11 83 für eine Terminvereinbarung mit unserem Laboraußendienst. Vielen Dank.

### Lagerung/Transport

- bei Raumtemperatur, keinesfalls gekühlt
- stehend